

Hurtigoppsett for DMS Pro

Eversense DMS Pro-programvaren er beregnet for klinikkbruk. Dette arket viser et hurtigoppsett for en Eversense DMS Pro-konto. Se brukerveiledningen for Eversense DMS Pro (global.eversenseddiabetes.com) for fullstendige instruksjoner.

1 Registrering for Eversense DMS Pro

Gå til <https://pro.eversensedms.com>.

Klikk på **Helsepersonell**

2 Be om en Eversense DMS Pro-konto

Fyll ut skjemaet ved å legge inn opplysningene til klinikken.

- Under "Fornavn" og "Etternavn" anbefales det å enten skrive inn navnet på klinikken eller navnet på helsepersonell på klinikken. (Dette er det pasientene vil se når de deler data.)
- Velg en "Tittel" fra rullegardinlisten, og fyll ut resten av de nødvendige feltene.

Klikk på **Send inn** når skjemaet er fylt ut.

Merknader:

- Du finner informasjon om hvordan du kan legge til ekstra klinikkpersonell til Eversense DMS Pro-klinikken i brukerveiledningen til Eversense DMS Pro.
- Du kan ikke bruke den samme e-postadressen for både en Eversense DMS Pro-konto og en personlig Eversense DMS-konto.

3 Du vil motta to e-poster

- Du vil få en bekreftelse på kontoregistreringen.
- Du vil få en e-post med kontogodkjenning (kan ta opptil 24 timer). Klikk på lenken* i e-posten for å fullføre aktivering av kontoen.
- Registrer viktig kontoinformasjon i boksen nedenfor.

*Lenken utløper etter 72 timer. Hvis lenken utløper, kontakter du Ascensia Diabetes Care kundeservice.

Klinikknavn:.....

E-post:.....

Passord:.....

Klinikk-ID-nr.:.....

MERK: Passord og klinikk-ID-nr. genereres etter at kontoen er aktivert.


4 Logg på klinikkens Eversense DMS Pro-konto

Den tilordnede klinikk-ID-en finnes øverst.

Merk: Pasienter trenger klinikknummeret når de sender en forespørsel om å dele sine CGM-data med klinikken.

5 Invitere pasienter til klinikken

- På navigasjonslinjen på venstre side klikker du på **Pasient**. Klikk deretter på **Inviter pasient**.
- Legg inn pasientens Eversense-e-post (den som ble brukt til å konfigurere mobilappen og opprette Eversense-kontoen).
- Klikk på **Søk i Eversense**.

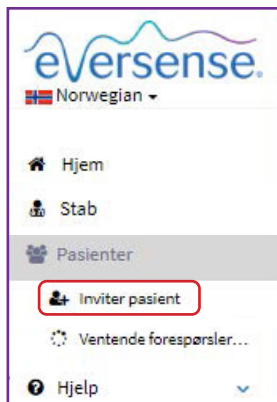

Hvis pasientens e-post er registrert, vises feltet til høyre. Fyll ut all obligatorisk informasjon, og trykk deretter på **Send**. Dette genererer en e-post med invitasjon til pasienten.

MRN
Medisinsk oppføringsnummer

Etternavn *
G

Fødselsdato
Måned Dag År

Behandler *
Select...

Fornavn *
Kim


Mann Kvinne

Merk: Hvis den angitte e-postadressen ikke er registrert hos Eversense, vil du motta en feilmelding. Bekreft med pasienten hvilken e-postadresse som ble brukt ved konfigurering av kontoen.

Når pasienten godtar invitasjonen, gjøres tegnet **✗** under Datadeling om til **✓**. Klikk på navnet til pasienten for se rapportene.

| Pasientens etternavn | Pasientens fornavn | MRN | Kjønn | DOB | Behandlernavn | Status | Datadeling |
|----------------------|--------------------|-----|--------|-----|---------------|--------|------------|
| Doe | Jane | | | | John Doe | Actif | ✓ |
| Johanson | Susan | | Female | | John Doe | Actif | ✓ |

Merk: Pasienten kan be om å få dele sine data. Ventende forespørsler fra pasienter vises i navigasjonslinjen. Klikk på **Pasienter > Ventende forespørsler**.

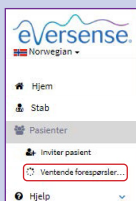

Spørsmål? Vi er her for deg!
Ring Ascensia Diabetes Care kundeservice på 67122800 #1, eller finn oss online på diabetes.ascensia.no.

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en erstatning for, blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler, pasienter bør snakke med helsepersonell for å få mer informasjon. Se global.eversensedibetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Apple Watch® er et produkt fra Apple, Inc., og kan kjøpes separat fra en autorisert Apple-forhandler. Apple Watch er ikke inkludert i Eversense CGM-systemet. Android er et varemerke som tilhører Google LLC.



PRODUSERT AV
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversensedibetes.com

DISTRIBUERT AV
ASCENSIA DIABETES CARE NORWAY AS
Strandveien 50
1366 Lysaker I Norge
67122800 | diabetes.ascensia.no